

ankaferd
BLOOD STOPPER®



PRODUCTO SANITARIO CON ACCIÓN HEMOSTÁTICA

ANKAFERD BLOOD STOPPER



ANKAFERD BLOOD STOPPER

Es un producto sanitario de **acción hemostática inmediata** tras lesiones corporales e incisiones quirúrgicas.

COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO


ABS ES UNA MEZCLA ESTANDARIZADA DE PLANTAS.

NO CONTIENE DERIVADOS DE SANGRE HUMANA, TEJIDO ANIMAL, PRODUCTOS QUÍMICOS
NI ALCOHOL NI FTALATOS..



Mecanismo de Acción Único

- La aplicación de Ankaferd Blood Stopper a la herida sangrante forma una red de proteínas que proporciona focos para la agregación de eritrocitos, lo cual acelera el proceso hemostático fisiológico sin alterar ningún factor de coagulación.
- Los principales objetivos del ABS son: los receptores de superficie espectrina y anquirina de los glóbulos rojos (RBC) y la enzima ferroquelatasa interna, los factores de la transcripción relacionados (como GATA-1) y las proteínas relacionadas con los RBC (como la urotensina). Esas proteínas y la bioenergía de trifosfato de adenosina (ATP) requerida, están incluidas en la biblioteca de proteínas de Ankaferd.

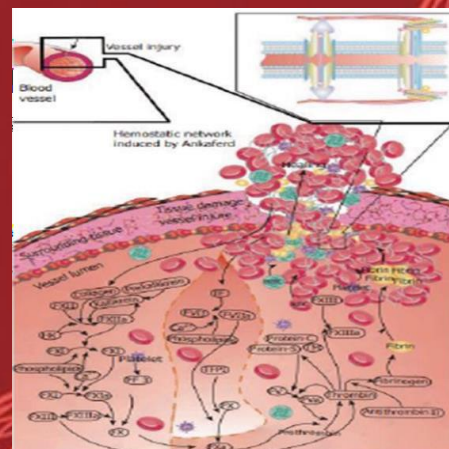



Ankaferd Blood Stopper representa su efecto hemostático único al promover la formación muy rápida (<1 segundo) de una red de proteínas, cubriendo el modelo clásico de cascada del sistema de coagulación actuando de forma independiente sobre los factores de coagulación y las plaquetas.. [1]

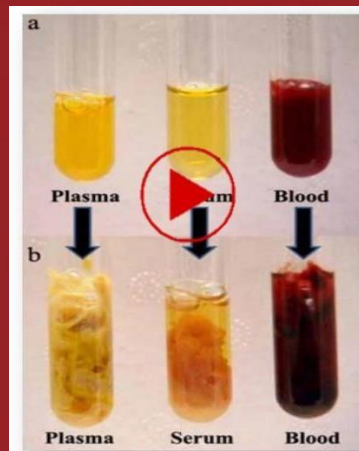


Fig.2. Antes y después de la aplicación de Ankaferd en plasma, Suero y sangre.

ANKAFERD BLOOD STOPPER



Rápido y Fuerte

ABS actúa de manera rápida en el sitio de la herida, acelerando la formación de coágulos y deteniendo la hemorragia.



Cicatrización de la herida

ABS da como resultado una cicatrización limpia de la herida tan fuerte como la reparación primaria y actúa específicamente en el sitio de la lesión sin afectar negativamente la coagulación normal



Versátil

ABS es adecuado para una amplia gama de heridas, incluyendo cortes, abrasiones y heridas inciso - contusas



Seguridad a base de plantas

ABS ha demostrado un perfil de seguridad favorable en estudios clínicos y su uso no está asociado con efectos adversos, contraindicaciones ni interacciones farmacológicas.



Antimicrobiano

Es antimicrobiano y antifúngico. Destruye los microorganismos en el área de aplicación y alrededor de ella.



Listo para usar

No requiere cadena de frío, se puede almacenar fácilmente y es fácil de llevar. Aguanta temperaturas hasta 40 grados.

ANKAFERD BLOOD STOPPER

- ❖ Es un producto medicinal que muestra una acción hemostática inmediata después de lesiones corporales y cortes traumáticos quirúrgicos.
- ❖ Estudios científicos; El Prof. Dr. İbrahim Haznedaroğlu, Director de Hematología de la Universidad Hacettepe, realizó estudios científicos con su equipo y obtuvo por separado una licencia para cada presentación del Ministerio de Salud de Turquía.
- ❖ Ankaferd Blood Stopper cuenta desde 2005 con 234 publicaciones científicas disponibles en PubMed.
- ❖ Obtenida la certificación CE en 2017. El Producto está catalogado como Dispositivo Médico Clase III.

ANKAFERD BLOOD STOPPER

Área de uso recomendada

Este producto se utiliza como Hemostático para todas las heridas externas y cortes traumáticos para todos los pacientes. ABS Push & Stop Tampon puede ser utilizado de forma segura por todos los grupos de pacientes, incluidos los pacientes que padecen hemofilia, diabetes e hipertensión, así como por mujeres embarazadas y todos los grupos de edad, incluidos niños y ancianos.





ANKAFERD BLOODSTOPPER

ANKAFERD VS OTROS

Detiene la hemorragia

Detiene la hemorragia incluso en deficiencias de factores, de coagulación: Hemofilia, Diabetes, Von Willebrand.

Detiene la hemorragia en pacientes tratados con anticoagulantes

Composición 100% basado en plantas.

Formación de una red de proteínas.

No produce irritación, efectos secundarios o reacciones alérgicas.

Control rápido de la herida.

Almacenamiento fácil a temperatura ambiente.

El más económico.

Muestran descenso en la hemorragia.

No son efectivos en hemofilia, diabetes, Von Willebrand.

No efectivos en pacientes tratados con anticoagulantes, Dependientes del sistema de coagulación clásica.

Pueden causar complicaciones.

Requisitos especiales de almacenamiento.

Son más caros.



PRESENTACIONES PRODUCTOS

- Nueve presentaciones diferentes en tres tipos de productos de acuerdo con el área de aplicación:

Tampón Húmedo (esponja)

Tampon reabsorbible

Push & Stop



PUSH & STOP TAMPON

Diseñado para pequeñas heridas, cortes traumáticos, y sangrados en miembros superiores e inferiores.




Push & Stop Tampon - 2,0 ml

Push & Stop Tampon - 3,5 ml

ankaferd
BLOODSTOPPER[®]
Hemostatik Ajan



1 box / 12 pc

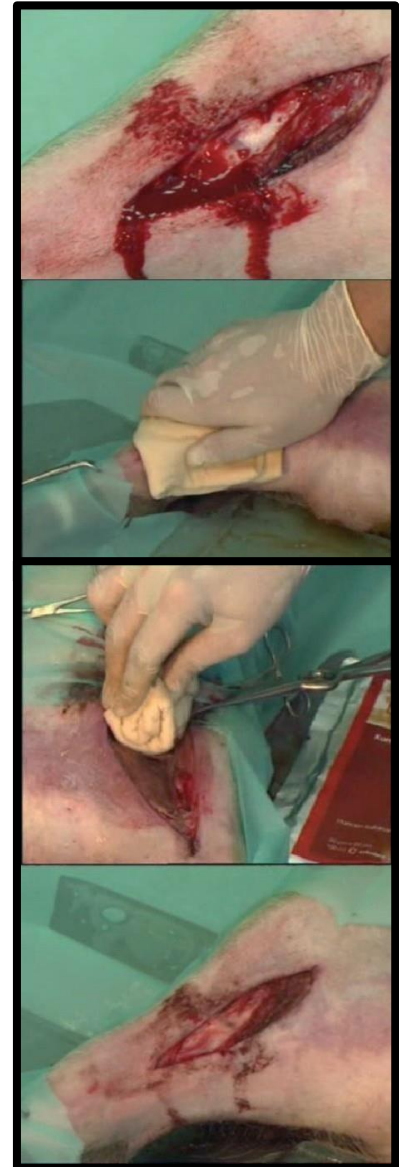



ANKAFERD BLOOD STOPPER

Los estudios científicos han recibido publicaciones en revistas internacionales de autor sin ningún orden de espera.

Hay más de 200 publicaciones en pubmed y más en otras publicaciones prestigiosas.

-



CERTIFICADOS - CERTIFICATES

DECLARATION OF CONFIRMITY



TSUBOI ET AL.

We, İMMÜN GIDA İLAÇ KOSMETİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ., hereby declare that our products:

AnikaBead Blood Stopper® Absorbable Wet Temp 1 cur 1 x 2.5 cm tampon - with 0.5 ml
 AnikaBead Blood Stopper® solution in a needle-free syringe
 AnikaBead Blood Stopper® Absorbable Wet Temp 2 cur 2 x 2.5 cm tampon - with 1.0 ml
 AnikaBead Blood Stopper® solution in a needle-free syringe
 AnikaBead Blood Stopper® Absorbable Wet Temp 3 cur 3 x 5 cm x 5 cm tampon - with 2.5 ml
 AnikaBead Blood Stopper® solution in a needle-free syringe
 AnikaBead Blood Stopper® Absorbable Wet Temp 5 cur 5 x 5 cm tampon - with 5.0 ml
 AnikaBead Blood Stopper® solution in a needle-free syringe
 AnikaBead Blood Stopper® Absorbable Wet Temp 10 cur 10 x 10 cm tampon - with 10 ml
 AnikaBead Blood Stopper® solution in a needle-free syringe

are classified as class II products in accordance with 93/42 / EEC Medical Device Regulation Annex IX Rule 13 and comply with the basic requirements of the II-1 module including Annex II Article 4 of the same regulation.

EC DESIGN AND EXAMINATION CERTIFICATE

Certificate Number	1785-MDD-531
Notified Body No	1785
Certificate Date	02.07.2018
Certificate Validity Date	26.06.2024
GRON Code	18771
Certificate Revision Date	-
Notified Body Name/Address	TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ NECAFİYİ CAD. NO:112 BAKKALKÖY-ANKARA

FULL QUALITY ASSURANCE MODULE CERTIFICATE

Certificate Number	: 1763-MDD-130
Notified Body No	: 1763
Certificate Date	: 02.07.2019
Certificate Validity Date	: 28.05.2024
OMON Code	: 38771
Belge Değişiklik Tarihi	: -
Notify Body Name/Address	: TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ NİCAATYOLU CAD. NO:112 BEĞAZIUSULU/ANKARA



© 2000 by John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved.
 Printed in the United States of America
 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1



DECLARATION OF CONFIRMITY



TSE / 1783

We, NIMIN GIDA ILAC KOSMETIK SAN. VE TIC. LTD. STI., hereby declare that our products:

Askafed Blood Stopper Wet Tampon or Sponge 2.5 cm x 7 cm 3 ml,
 Askafed Blood Stopper Wet Tampon or Sponge 5 cm x 5 cm 8 ml,
 Askafed Blood Stopper Wet Tampon or Sponge 5 cm x 7.5 cm 10 ml,
 Askafed Blood Stopper Wet Tampon 7.5 cm x 7.5 cm 11 ml,
 Askafed Blood Stopper Wet Tampon 7.5 cm x 17.5 cm 34 ml,
 Askafed Blood Stopper Wet Tampon 28 cm x 20 cm 190 ml.

are classified as class II products in accordance with 93/42 / EEC Medical Device Regulation Annex-IX Rule 13 and comply with the basic requirements of the H-1 module including Annex-6 Article 4 of the same regulation.

EC DESIGN AND EXAMINATION CERTIFICATE

Certificate Number	1783-MDO-004
Notified Body No	1783
Certificate Date	26.10.2017
Certificate Validity Date	26.10.2022
GS03 Code	38775
Certificate Revision Date	22.05.2019
Notified Body Name/Address	TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ NECAFİYE CAD. NO:110 SAKARYA/KARAKÖY 34090 BEŞİKTAS/İSTANBUL

FIELD QUALITY ASSURANCE MODULE CERTIFICATE

Certificate Number	: 1763-MED-003
Certified Body No	: 1763
Certificate Date	: 26.10.2017
Certificate Validity Date	: 26.10.2026
Global Code	: 26171
Relge Geygi&A Tarifi	: 25.05.2016
Notify Body Name/Address	: TONK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ NEOATKÖY CAD. NO:113 SAKAKILAR ANKARA



© 2007 The Authors
Journal compilation © 2007 Blackwell Publishing Ltd



ankaferd BLOODSTOPPER[®]

Haemostatic Agent



“Invention of the Century in the Field
of Bleeding Control”

ankaferd
●●●●



GRACIAS

PARA MAS INFORMACION



Global Health Solutions