



ankaferd
BLOODSTOPPER[®]

Nosotros

La empresa fue establecida en 2004 en Estambul. Las primeras investigaciones científicas fueron realizadas por el Prof. Dr. İbrahim Haznedaroğlu, Jefe del Departamento de Hematología de la Universidad de Hacettepe, y su equipo. Nuestro producto fue establecido en la literatura médica como un agente hemostático moderno con la contribución de cientos de científicos turcos en 2007 y fue documentado con el permiso de producto intermedio del Ministerio de Salud. La publicación de artículos en The Journal of International Medical Research y Blood en el mismo año marcó el inicio de nuestro reconocimiento internacional.

El primer certificado de calidad CE (Certificación de Europa) se recibió en 2013, se completaron los estudios de fase en 2017 y se obtuvo una licencia farmacéutica. Nuestro producto es el primer y único medicamento local original con licencia del Ministerio de Salud de la República de Turquía. Hasta el momento se han publicado casi 350 artículos científicos en publicaciones internacionalmente aceptadas.

La sede se encuentra en Saryer, la fábrica de nuestra empresa está ubicada en Ataşehir, donde la producción se lleva a cabo de acuerdo con estándares internacionales.

Misión:

Nuestro objetivo es salvar vidas humanas en todas las áreas de sangrado con nuestros productos únicos y poderosos, y ser uno de los agentes hemostáticos más confiables e ideales en el control del sangrado.



Producto



Ankaferd Blood Stopper es un producto sanitario que ofrece un efecto hemostático INMEDIATO ÚNICO después de lesiones corporales, cortes traumáticos y/o quirúrgicos. Sus diferentes formatos permiten su uso en múltiples áreas y servicios.


Ankaferd Blood Stopper se puede utilizar en cirugía general, cardíaca, hepática, ortopédica, quemaduras, úlceras, cirugía abierta, endoscopia, laparoscopia.

Muy útil como adyuvante a la hemostasia cuando el control de la hemorragia por técnicas quirúrgicas convencionales resulta inefectivo o cuando el control de la hemorragia por técnicas quirúrgicas convencionales resulta inefectivo o impracticable.

Ankaferd Blood Stopper puede utilizarse en situaciones de emergencia, fuera del entorno hospitalario. Es de fácil aplicación y acción inmediata

Producto Sanitario Clase III, con marcado CE 1783

Eficacia

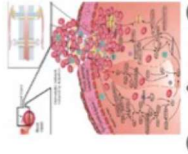

Mecanismo de Acción Único
La aplicación de Blood Stopper a la herida sangrante forma una red de proteínas que proporciona focos para la agregación de eritrocitos, lo cual acelera el proceso hemostático fisiológico sin alterar ningún factor de coagulación. [1]



Rápido y fiable:

Ankaferd Blood Stopper desarrolla muy rápidamente (<1 segundo) una red proteica en la zona hemorrágica.

Apto para todo tipo de pacientes:

Hemofílicos, diabéticos, pacientes con problemas de coagulación en tratamiento con anticoagulantes y antiagregantes

Listo para utilizar:

No necesita condiciones especiales para su conservación. No necesita cadena de frío. Fácil de transportar.

Antibacteriano:

Antifúngico. Estéril. Elimina los gérmenes en el área de aplicación

Cicatrización de la herida:

La aplicación de Ankaferd Blood Stopper da como resultado una cicatrización limpia de la herida que es tan consistente como la reparación primaria.

Fórmula a base de extractos vegetales:

Sin aditivos inorgánicos/sintéticos, sin alcohol ni ftalatos. Hipoaérgico.

ankaferd
BLOODSTOPPER ES UNA MEZCLA ESTANDARIZADA DE PLANTAS. NO CONTIENE DERIVADOS DE SANGRE HUMANA, TEJIDO ANIMAL, PRODUCTOS QUÍMICOS, NI ALCOHOL, NI FTALATOS



Urtica dioica
- Oruga Mayor -
(Extracto seco de hoja)



Vitis vulpina
- Vid -
(Extracto seco de hoja)



Glycyrrhiza glabra
- Regaliz -
(Extracto seco de raíz)



Alpinia officinarum
- Galanga menor -
(Extracto seco de raíz)



Thymus vulgaris
- Tomillo -
(Extracto seco de hierba)



Ankaferd Blood Stopper

Jeringa y Almohadilla Húmeda Absorbible

PROPÓSITO DE USO

Detiene el sangrado cuando se aplica presionando ligeramente sobre el área sangrante durante un corto período de tiempo en cortes, lesiones traumáticas y casos donde se ha visto comprometida la integridad del tejido. Ankaferd Bleeding Stopper se acompaña de una Almohadilla Húmeda Absorbible de celulosa oxidada al 100% que puede ser absorbido por el cuerpo y utilizado con ANKAFERD con fines hemostáticos en áreas sangrantes. Dependiendo del área sangrante y la cantidad de sangrado, pueden requerirse diferentes tipos de tampones. Es adecuado para su uso por profesionales de la salud en intervenciones endoscópicas y cirugías laparoscópicas.

CONTENIDO DE LA CAJA

Cada caja contiene un conjunto estéril, empaquetado y desechable de un jeringa de Ankaferd y una Almohadilla Húmeda Absorbible.

El kit contiene una Almohadilla Húmeda Absorbible de celulosa oxidada estéril, empaquetado y desechable, absorbible por el cuerpo, y un inyector con la solución Ankaferd.



Ankaferd Blood Stopper

Jeringa y Almohadilla Húmeda Absorbible


ÁREAS DE USO :

- En cortes, lesiones traumáticas, y en casos donde la integridad del tejido esté comprometida en cualquier parte del cuerpo.
- En sangrados del tracto gastrointestinal.
- Durante operaciones quirúrgicas y en lugares donde existe la posibilidad de sangrado postoperatorio.
- En todos los procedimientos de endoscopia y colonoscopia.
- Es adecuado para su uso en sangrados arteriales, epistaxis y todo tipo de sangrados.
- También funciona muy bien por su efecto antimicrobiano y por favorecer la cicatrización, en múltiples tipos de heridas infectadas y difíciles de cicatrizar, ó como tratamiento coadyuvante en tejidos hemorrágicos infectados.
- Los productos de 0.5 ml y 1 ml están diseñados para uso dental. Su uso en operaciones de extracción dental complicadas o normales, sangrado durante y después de procedimientos de implantación.

Importante: La almohadilla húmeda absorbible Ankaferd Blood Stopper no debe colocarse en una vena o en el sistema de circulación sanguínea.

El tampón de celulosa regenerada oxidada ABS detiene el sangrado tanto en individuos con valores hemostáticos normales como en pacientes con diátesis hemorrágica con trastornos de hemostasia primaria o secundaria, como por ejemplo en pacientes con hemofilia. Se han demostrado efectos bactericidas y fungicidas en estudios in vitro, y su uso como adyuvante al tratamiento en tejidos hemorrágicos infectados puede ser beneficioso.

USO EXTERNO

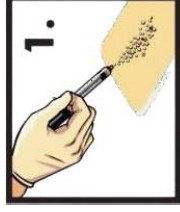

ABS - Inyector de solución	ORC – Tamaño del tampón	Recomendado
0,5 ml	(1cm x 2,5cm)	Uso Dental
1 ml	(2cm x 2,5cm)	Uso Dental
2,5 ml	(2,5cm x 5cm)	
5 ml	(5cm x 5cm)	
10 ml	(5cm x 10cm)	


Ankaferd Blood Stopper

Jeringa + Almohadilla Húmeda Absorbible

ÁREAS DE USO CON DISPOSITIVOS ENDOSCÓPICOS:

- Tampón Absorbible Húmedo de Ankaferd Blood Stopper puede ser utilizado con dispositivos endoscópicos.
- El Tampón de Celulosa Regenerada Oxidada de Ankaferd se coloca sobre la superficie sangrante mediante el método endoscópico. Los inyectores de Solución Ankaferd son compatibles con el catéter. La tapa del inyector se retira y el inyector se bloquea en un catéter de pulverización colocado dentro del canal de trabajo del endoscopio para rociar la solución Ankaferd sobre la almohadilla absorbible.
- El Tampón Absorbible Húmedo de Ankaferd Blood Stopper se ofrece con cinco opciones de volumen de jeringa. Debe seleccionarse el tamaño apropiado para el procedimiento endoscópico que se vaya a realizar.
- El catéter de inyección debe colocarse lo más cerca posible del punto de sangrado.
- Debe darse suficiente tiempo para que ocurra la hemostasia antes de aplicar más. Cuando se observe un cambio de color, la hemostasia debería haber ocurrido.

USO INTERNO

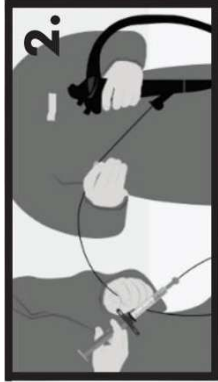

ABS - Inyector de solución	ORC – Tamaño del tampón	Recomendado
0,5 ml	(1cm x 2,5cm)	Uso Dental
1 ml	(2cm x 2,5cm)	Uso Dental
2,5 ml	(2,5cm x 5cm)	
5 ml	(5cm x 5cm)	
10 ml	(5cm x 10cm)	

Ankaferd BloodStopper

Tampón Húmedo

PROPÓSITO DE USO

Detiene el sangrado cuando se aplica presión suave sobre el área sangrante durante un corto período de tiempo en cortes, lesiones traumáticas y casos donde la integridad del tejido está comprometida. El Tampón Húmedo Ankaferd Blood Stopper puede ser utilizado de manera segura en todos los grupos de pacientes, incluidos los pacientes con hemofilia, diabetes e hipertensión, y en todos los grupos de edad, incluidas mujeres embarazadas, niños y personas mayores. Dependiendo del tamaño de la herida o corte, la densidad del vaso sanguíneo sangrante y las funciones vitales del paciente, pueden ser necesarios diferentes tipos de tampones.

CONTENIDO DE LA CAJA

Cada caja de Tampón Húmedo Ankaferd Blood Stopper contiene 12 productos desechables estériles y empaquetados.




Ankaferd Blood Stopper

Tampón Húmedo

ÁREAS DE USO

- Hospitales
- Centros de Salud (URGENCIAS)
- Unidades de heridas
- Fuerzas Armadas
- Fuerzas de Seguridad
- Equipos de Respuesta a Emergencias
- Quirófanos
- Centros de Primeros Auxilios
- Ambulancias
- Cuerpos de bomberos, etc.

- El empaque del tampón debe abrirse desgarrando la muesa.
- El tampón húmedo que sale del empaque debe presionarse suavemente sobre el área sangrante para asegurar que el sangrado alcance su origen.
- Después de que el sangrado esté controlado, el Tampón Húmedo Ankaferd Blood Stopper no debe dejarse en el cuerpo.

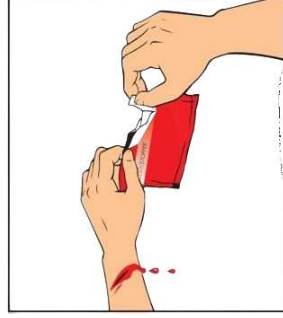

USO EXTERNO

Tampón Húmedo

2,5 x 7cm - 3ml
5 x 5cm - 5ml
5 x 7,5cm - 10ml
20 x 20cm - 100ml

OTRAS ÁREAS DE USO:

Curación de heridas y quemaduras

- Efecto antimicrobiano que favorece la cicatrización en múltiples tipos de heridas infectadas y difíciles de cicatrizar.
- Tratamiento coadyuvante en tejidos hemorrágicos infectados.

USO EXTERNO

Ankaferd Blood Stopper Jeringa y Almohadilla Húmeda Absorbible

PAUTA DE USO:

Ankaferd Jeringa y Almohadilla Húmeda Absorbible esparcir el producto de la jeringuilla precargada (una fina capa) directamente en la zona de la herida o bien, en una gasa estéril (luego ponerla sobre la herida), para posteriormente tapar la herida, con un apósito o una venda, para que actúe el producto durante 48 h. (2 días).

Después retirarla y repetir el proceso y cubrir nuevamente la zona de la herida o en una gasa estéril con la jeringa precargada y mantener la gasa con una venda o apósito sobre la zona de la herida para que no se mueva. Dejar actuar durante 48 a 72 h. (2 o 3 días).

Después de ese tiempo, ya se tiene que haber notado la mejoría en la epitelización y regeneración de la herida y acabado con la infección. Luego a vuestro criterio según la situación de esa herida, podéis continuar o no, con la misma pauta cada 72 horas.



1. Día
Herida Infectada



4 Horas Después



1. Día



9. Días



21. Días

CURACIÓN DE HERIDAS CON ANKAFERD BLOODSTOPPER®

Cicatrización óptima de heridas en un paciente de 91 años con diabetes

APLICACIÓN EN QUEMADOS ANKAFERD BLOODSTOPPER®



Tras aplicación ABS
Inglés, TEA femoral, paciente 53 años, trasplantada



Tras 24 horas ABS



Antes y después de aplicación
tópica En paciente quemado.

Ankaferd Blood Stopper Tampón Húmedo

PAUTA DE USO:

Ankaferd Tampón Húmedo: colocar sobre la herida y cubrir con un apósito/venda para que no se mueva, dejando que actúe durante 48 h. (2 días).

Después retirar y utilizar otro Ankaferd Tampón Húmedo y mantenerlo con una venda o apósito sobre la zona de la herida, pero durante 72 h. (3 días).

Después de ese tiempo, ya se tiene que haber notado la mejoría en la epitelización y regeneración de la herida y acabado con la infección. Luego a vuestro criterio según la situación de esa herida, podéis continuar o no, con la misma pauta cada 72 h.